


## BRUKSANVISNING

# Big Red kontakt

### ① Ansluta kontakten

Anslut kontakten till den enhet du önskar som har ett mono 3,5 mm-uttag.

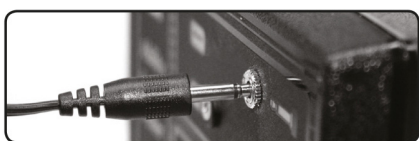

OBS! Du behöver en kontaktlåda ( APPLICATOR, Switch2Scan, Bläckfisken, etc) för att ansluta Big Red till en dator (säljes separat).



### ② Aktivera kontakten

När du trycker ner kontaktens tryckyta aktiveras den enhet som kontakten är ansluten till.



### ③ Förvaring och rengöring

Koppla ur kontakten innan rengöring med fuktig trasa eller alkohol. Använd inte lösningsmedel eller sänk ner kontakten i vatten. Utsätt inte kontakten för extrem värme eller kyla.

### ④ Montering

Big Red kan monteras på ett flertal olika sätt. Kontakta oss på Funktionsverket för mer info.

### ⑤ Byta färg och använda bilder

Det ingår fyra olika lock så att du kan skräddarsy din Big Red i den färg du önskar. Vrid locket moturs för att ta bort det, medurs för att fästa det.



Det finns också ett transparent lock som kan användas för att anpassa din Big Red med en bild eller symbol.



Tel: 031-75 77 950

E-post: [info@funktionsverket.se](mailto:info@funktionsverket.se)

Webb: [www.funktionsverket.se](http://www.funktionsverket.se)