

## BRUKSANVISNING

# Timstock 60 min 20 dioder

### Användning

Tryck på den knapp som motsvarar den önskade tiden. Lysdioderna tänds upp motsvarande den tid som startknappen representerar och nedräkningen startar.

Den startade tiden kan raderas genom att röd och blå startknapp trycks in och hålls intryckta samtidigt under 2 sekunder. Därefter kan ny tid startas.

På timstockens kortsida finns ett reglage för att ändra ljudsignalen. Då reglaget är i minläge är ljudet helt avstängt och signalering sker endast genom blink med lysdioderna.

### Batteri

I leveransen ingår två stycken 1,5V batterier typ R6. Dessa räcker för ca 60 timmars användning.

När lysdiodernas ljusstyrka börjar avta ska båda batterierna bytas. Batteriluckan är låst med en skruv (krysspår).

### Rengöring

Torka av timstocken med lätt fuktig luddfri trasa med vanligt rengöringsmedel eller rengöringsduk avsedd för elektronik.



### Tidsintervall

En diod släcks var tredje minut.

Välj mellan:

15 min, 30 min, 45 min och 60 min

### Specifikationer

Yttermått: 111x52x27 mm

Vikt 115 g



## funktionsverket

Tel: 031-75 77 950

E-post: [info@funktionsverket.se](mailto:info@funktionsverket.se)

Webb: [www.funktionsverket.se](http://www.funktionsverket.se)