

BRUKSANVISNING

GoTalk Button

Introduktion

GoTalk Button är en liten samtalsapparat som går att ta med sig överallt. Den har en magnet på baksidan som gör att du kan fästa den på t ex ett kylskåp eller en whiteboard.

GoTalk Button kan spela in ett meddelande på 10 sekunder som spelas upp med en förgylld playknapp.



Spela in meddelande

På baksidan av GoTalk Button finns en guldfärgad knapp. Dra knappen åt vänster till Rec. Tryck och håll inne den stora guldknappen på framsidan av enheten under tiden du läser in ditt meddelande. När du är klar släpper du knappen. Dra knappen på baksidan åt höger till Play.

Spela upp meddelande

Tryck på den stora knappen på framsidan av din GoTalk Button. Meddelandet spelas upp. Du kan när som helst avbryta uppspelningen genom att trycka på knappen igen under tiden som meddelandet spelas upp.

Spela in nytt meddelande

Du kan enkelt byta meddelande genom att helt enkelt spela in ett nytt meddelande. Följ instruktionerna för att spela in meddelande ovan.

Radera meddelande


Ställ in den guldfärgade knappen på baksidan på Rec. Tryck därefter kort på den stora knappen på framsidan. Meddelandet är nu borttaget.-

Dags att byta batterier?

Om ljudet börjar knastra vid uppspelningen behöver du byta batteri i din GoTalk Button.

Byt batteri så här:

1. Öppna batteriluckan på baksidan av enheten genom att skruva den motsols.
2. Ta bort det gamla batteriet och byt mot ett nytt CR2016-batteri. Se till att den positiva polen (+) placeras som på bilden intill.
3. Skruva tillbaka batteriluckan i medsols riktning.

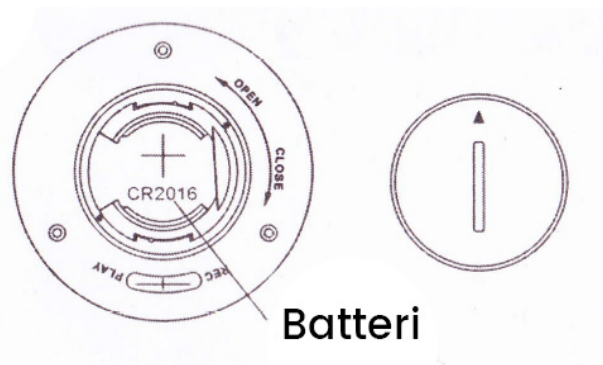

Lämna det gamla batteriet till återvinning. Släng aldrig ett batteri i soporna!

Miljöinformation

GoTalk Button sorteras som elavfall och lämnas in till återvinningsstation. Gamla batterier lämnas in till batteriinsamling. Elda aldrig upp ett batteri!

Du kan också skicka in din gamla GoTalk Button till oss på Funktionsverket så ser vi till att den återvinns på korrekt sätt.



funktionsverket

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se